



Miragyn[®] GEL



Composizione

Acqua Purificata, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Glicerina Vegetale, Aloe Vera Polvere Liofil., Sodio Benzoato, Acido Borico, Sodium Hyaluronate, Hydroxyethylcellulose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/vp Copolymer, Caprylic/capric Trygliceride, Tocopheryl Acetate, O-cymen-5-ol, Potassio Sorbato, Galactomannano, Lattobacillus Acidophilus, Lattobacillus Crispatus, Acido Lattico.

Categoria Terapeutica

Dispositivo Medico per somministrazione vaginale.

Indicazioni

Gel mucoadesivo utile in tutte le condizioni di secchezza e/o irritazione vaginale, favorisce il ripristino e il mantenimento dell'equilibrio fisiologico del pH vaginale, migliorando di conseguenza le difese naturali locali. Miragyn gel è utile nella prevenzione delle vulvovaginiti batteriche, micotiche, miste e delle infezioni da streptococco di gruppo B in gravidanza o come coadiuvante protettivo e lenitivo nel trattamento farmacologico delle stesse. Miragyn gel è utile nel contrastare la sintomatologia pruriginosa, il bruciore e l'irritazione della mucosa vaginale.

Posologia

Una applicazione a sera per sei giorni. Poi due applicazioni settimanali per tre settimane o secondo prescrizione medica.

Istruzioni d'uso

- 1) rimuovere il sigillo dall'applicatore monouso;
- 2) in posizione distesa a ginocchia sollevate ed allargate introdurre profondamente l'applicatore in vagina e premere energicamente fino alla completa fuoriuscita del gel, quindi estrarre l'applicatore.

Controindicazioni ed interazioni

Ipersensibilità accertata verso uno dei componenti. Nessuna interazione nota con altri medicinali o altre forme di interazione farmacologica.

Avvertenze

Gli applicatori sono monouso, non riutilizzare per evitare il rischio di infezioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Durante le prime applicazioni potrebbe verificarsi un bruciore transitorio, che tuttavia scompare con l'utilizzo regolare; se il bruciore dovesse persistere, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

Conservazione

Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C in luogo asciutto e al riparo dalla luce. Non refrigerare. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Contenuto della confezione

6 applicatori vaginali monouso da 6 ml